



MANUAL DO PROPRIETARIO

Modelo **GOODY2 SHOPPING** (a partir 2021)



CLIENTE: _____

DATA ENTREGA: _____ N.º SERIE: _____



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

A Condutron Comércio e Serviços Ltda se isenta de qualquer responsabilidade em danos pessoais ou de propriedade, causados por uso impróprio ou inseguro deste produto.

Utilize as seguintes regras como guia para uma operação segura no uso do seu equipamento. Se você tiver alguma dúvida em operar com segurança, ou sobre sua habilidade, entre em contacto com a Condutron. Siga as seguintes recomendações atentamente.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER:

- Leia o Manual de Instruções atentamente;
- Quando estacionar ou para se transferir, sempre desligue seu equipamento;
- Mantenha sentado quando o equipamento estiver em movimento;
- Mantenha as pernas na plataforma quando o equipamento estiver em movimento;
- Sempre dirija com velocidade baixa quando pedestres estiverem perto;
- Dirija devagar em curvas e inclinações;
- Desça ou suba inclinações de frente;
- Dirija com cuidado em rampas, pois nem todas as rampas são seguras. O padrão de inclinação das rampas deveria ser 2,5 cm de altura por 30 cm comprimento;
- Evite saídas repentinas com guidão virado;


O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER:

- Não ultrapasse a capacidade máxima permitida do equipamento. Exceder o peso viola a garantia e a Condutron não se responsabiliza por qualquer dano material ou pessoal;
- Não transpasse obstáculos maiores que 2.5 cm.
- Não ande para trás numa mudança de piso ou superfície irregular;
- Não carregue passageiro;
- Não desça inclinações de marcha ré;
- Não faça curva abrupta em velocidades alta ou em inclinações. O equipamento pode tombar lateralmente;
- Não solte o sistema de roda livre com alguma pessoa sentada no equipamento;
- Não remova o guidão para transportar o equipamento. Solte a articulação e deite-o até apoiar na carenagem;
- Não se apoie na direção para transferência.

PAINEL DE COMANDO:

Controles Inclusos: Chave de contato, luz de indicação de funcionamento, marcador de bateria e hastes de aceleração.

A chave é do tipo botao Liga/Desliga que se situa do lado direito do painel.

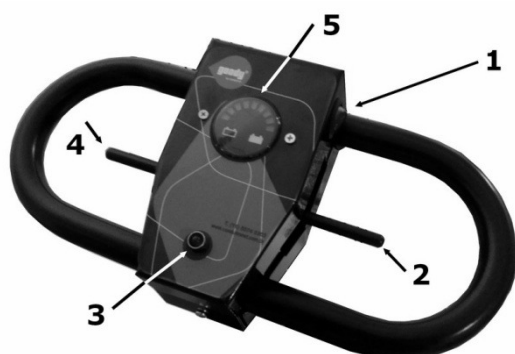

1. Chave Contato;
2. Haste Acelerador
3. Luz Indicação Funcionamento
4. Haste Acelerador;
5. Marcador Nível Baterias

ACIONAMENTO MANUAL:

O seu equipamento possui uma alavanca na carenagem de cobertura do motor próximo da roda traseira do lado direito. Para utilizar o equipamento com o motor, a alavanca devesse estar para Frente (Figura 3). Para movimentá-lo Manualmente, basta empurrar a alavanca para Trás (Figura 4).

Figura 3




Figura 4



ACIONAMENTO AUTOMÁTICO:


Após ligar seu equipamento através da chave, a luz do painel acenderá. Para movimentá-lo para frente, puxe a haste direita da direção para trás; ou empurre a haste esquerda da direção para frente; Para parar o equipamento, basta soltar a mão de qualquer uma das hastes. A parada não é instantânea para evitar um susto ou um "tranco". Para operá-lo para trás, basta mover a haste esquerda da direção para trás, ou a haste direita para frente. Figura 5.

Figura 5

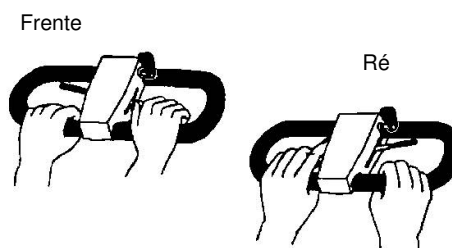

RETIRADA DO ASSENTO:

Para retirar o assento basta soltar os parafusos Allen indicados na foto abaixo e puxá-lo para cima. Utilize a chave Allen 1/4". Para recolocá-lo basta encaixar o tubo do assento no tubo do chassi, alinhar o assento e apertar os parafusos.

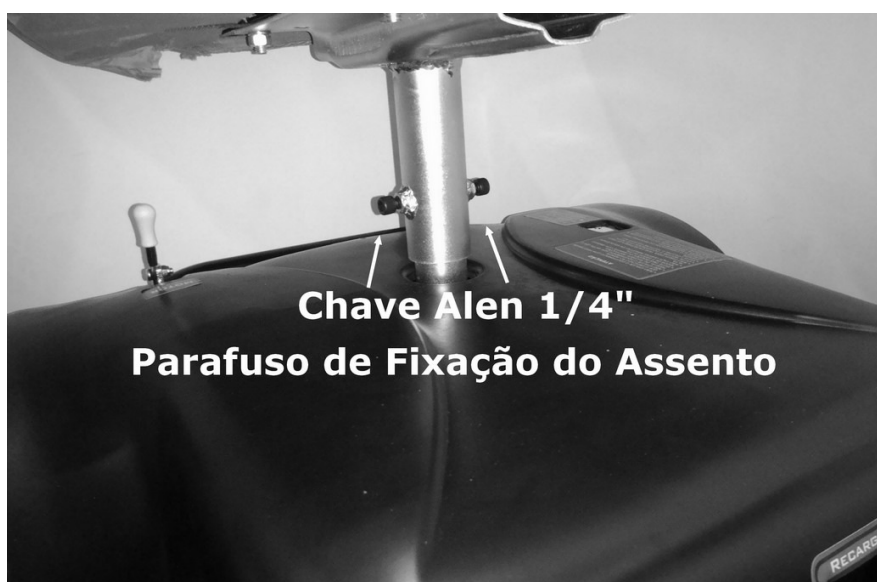

RETIRADA DA CARENAGEM:

Para retirar a carenagem, seja para realizar uma limpeza, inspeção ou mesmo retirar as baterias, existem 2 elásticos, tipo extensores, instalados na parte traseira passando por trás do pára-choque e outro na frente da carenagem passando por baixo do chassi. É necessário a retirada completa da carenagem. Basta soltar o elástico da frente pelo lado direito e atrás soltando por trás do pára-choque. Para retornar, recoloque a carenagem passando o elástico central por baixo do equipamento e colocando o nó no furo direito e posteriormente passe o elástico por trás do pára-choque.




CORTADOR DE CIRCUITO:

O Cortador de circuito é um componente elétrico instalado no equipamento para proteger motor, baterias e também a eletrônica. Ele serve como um fusível, mas que não queima, simplesmente cortando a corrente e apontando o botão para fora da carenagem. Basta esperar alguns instantes e apertá-lo para dentro de seu suporte. Ele atua quando forçamos o equipamento, subindo uma inclinação muito forte ou peso excessivo no equipamento.

INSTRUÇÕES DE RECARGA

O indicador do nível de baterias no painel do seu equipamento informa a quantidade de bateria disponível através dos ponteiro do painel. Quando o ponteiro estiver indicando na faixa vermelha, o seu Goody2 necessita de recarga. Este modelo está equipado com um Carregador de Baterias Interno, com indicadores (Leds) de carregamento que podem ser verificados pelo furo abaixo do assento. Para carregar as baterias basta ligar o Cabo de Força que acompanha o seu Goody2 numa tomada 220volts. O carregador está configurado para carregar somente em 220volts e não irá carregar em 110 volts. Veja as seguintes instruções:



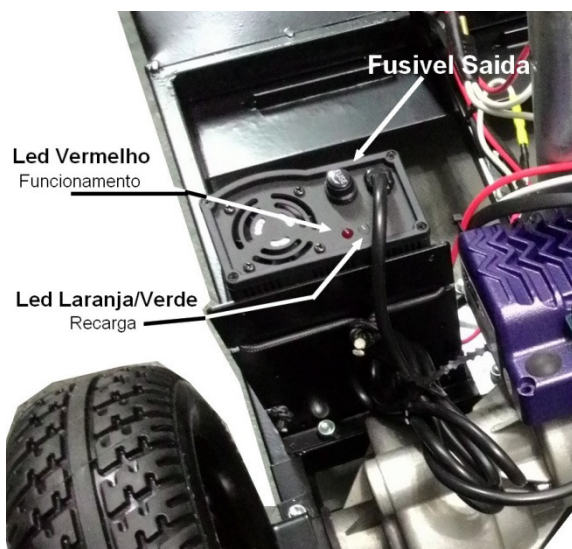

1. No carregador, os dois Leds (1 VERMELHO e 1 LARANJA) estarão acesos indicando que o equipamento está carregando as baterias.
2. O Led VERMELHO devera permanecer aceso durante toda a carga, e o Led LARANJA ira mudar de cor chegando a VERDE, indicando a carga completa. Não é necessário desligá-lo imediatamente após ficar VERDE.

Mal Funcionamento:

Indicação	Problema	Possível Solução
Nenhum dos LEDs acende	- Má conexão na tomadas; - Fusível de Entrada (Interno) queimado; - Carregador danificado;	- Verifique as conexões - Entre em contato - Entre em contato
Chave Seletora em 230v e ligar em Tomada 110v	- Led de Funcionamento (VERMELHO) e de Recarga (LARANJA) acesos e PLUG 3 pinos ligado ao equipamento.	- Mude a Chave Seletora para 115v
Chave Seletora em 115v e ligar em 230v	Queima o fusível de entrada	- Entre em contato, pois o fusível é interno.
Se o Led LARANJA não fica VERDE após 10 horas de recarga	- As baterias não podem ser carregadas - Carregador danificado	- Troque as baterias - Entre em contato
Somente o Led VERMELHO acende	- Baterias Desconectadas	- Verifique a conexão no carregador ou fiação interna do equipamento

INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA:

Ondas de Rádios podem afetar o Controle Eletrônico de sua Cadeira de Rodas Motorizada.


Ondas de rádio, tais como estações de rádios, estações de TV, Rádio Amador, "Walk Talks" e telefones Celulares, podem afetar as funções de sua cadeira de rodas motorizada. Abaixo seguem os cuidados que devem ser tomados para reduzir as chances do freio se soltar e movimentos desconhecidos de sua cadeira de rodas motorizada, que poderá ocasionar algum acidente:

- 1) Fique atento ao utilizar algum aparelho de comunicação como rádios ou telefones celulares, pois as suas ondas poderão interferir no freio automático de seu equipamento.
- 2) Fique atento ao chegar próximo de transmissores como estações de Rádio, TV ou Elétrica;
- 3) Se algum movimento sem intenção ou desconexão do freio acontecer, desligue a Chave de Contato o mais breve e seguro possível;
- 4) Fique atento em adicionar acessórios ou componentes, ou até modificar a sua cadeira de rodas motorizada. Isto fará que ela fique mais suscetível à interferência de ondas de rádios. Nota: Não há nenhuma maneira de avaliar tais efeitos na imunidade da cadeira;
- 5) Comunique qualquer incidente de movimentos sem intenção ou desconexão de freio ao fabricante e note se existe alguma Onda de Rádio próximo ao acontecimento.

Informações Importantes:

- a) 20 volts por metro (V/m) é geralmente um nível útil de imunidade contra interferência de ondas de rádio (desde Maio/94). Quanto maior o nível, maior a proteção.
- b) O nível de imunidade deste equipamento é desconhecido.

DIAGRAMA ELÉTRICO:

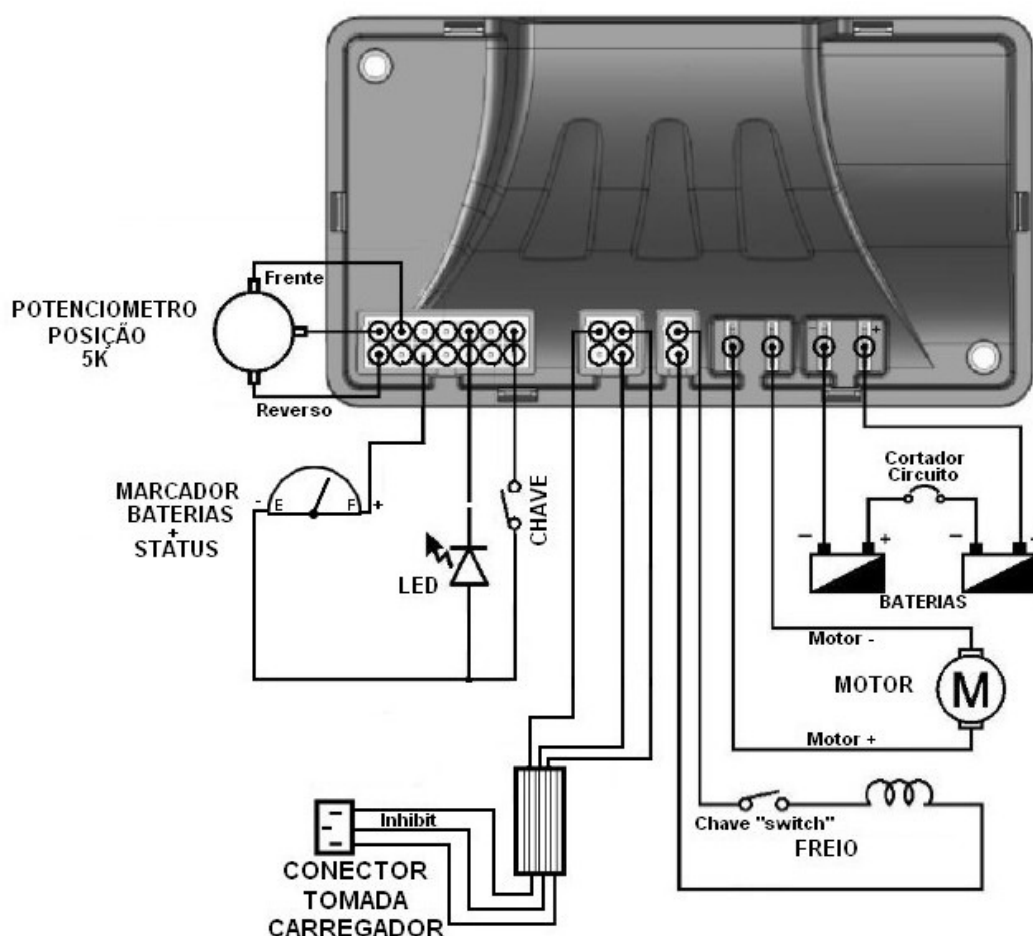

ANTES DE LIGAR PARA A CONDUTRON

O seu equipamento Goody2 Sporting é equipado com um Controle Eletrônico Micro-processado e programável, o que oferece maior segurança e também quando ocorre algum tipo de problema ou defeito (STATUS) ele acusa através de número de piscadas do Marcador de Baterias do Painel, conforme abaixo:

N.º Piscadas do LED	Funcionamento	Descrição do Defeito
LED Desligado		Equipamento desligado ou controle com defeito
LED LIGADO		Controle sem defeito
1	SIM	Carga das Baterias baixa. Recarregue-as
2	NAO	Carga das Baterias muito baixa. Recarregue-as
3	NAO	Carga das Baterias muito alta. Isto pode acontecer se as baterias estiverem completamente carregadas e o usuário andar em velocidade máxima em descidas. Desligue e religue o equipamento e diminua a velocidade em descida.
4	NAO	O equipamento está puxando muita carga por um longo tempo, devido ao motor estar sobrecarregado. Desligue o equipamento e aguarde alguns minutos e religue-o novamente. Se persistir ligue para a Condustron.
5	NAO	A alavanca do freio foi colocada na roda-livre ao ligar ou após ligado. Recoloque a alavanca na posição Motor (travado) e desligue o equipamento.

6	NAO	A alavanca do acelerador fora do centro. É necessário ajustar o potenciômetro na haste do acelerador.
7	NAO	Falha no potenciômetro de posição ou na sua fiação. Ligue para a Condutron.

Obs. Para que os códigos de falha desapareçam é necessário desligar e religar novamente o equipamento.

GARANTIA:

A Condutron garante os produtos que fabrica para o 1º comprador.

1. Componentes Estruturais: são garantidos contra defeitos de material e mão de obra de montagem por 1 ano, que são: plataforma, garfo, base do assento fixada na plataforma e base do assento fixada no assento, rodas e assento.
2. Componentes Eletrônicos e de Tração: são garantidos contra defeitos de material e mão de obra de montagem por 1 ano: Placa de Controle (CPU), carregador de baterias, diferencial, motor e freio.
3. Componentes Elétricos: são garantidos por 3 meses contra defeitos de material e mão de obra de montagem são limitados aos seguintes: Luzes LED, switches elétricos e mecânicos e baterias providas através da Condutron.
4. Restrições de peso: Usuário ou carga: 130 kg. Utilizar este equipamento com usuário ou cargas que excedam 130 kg não são recomendados e violam a garantia.

Disposições Gerais:

- Após 6 meses, a mão de obra será cobrada nos serviços de garantia.
- Itens trocados sob garantia não aumentam o período da garantia original.
- No período da garantia a Condutron tem a opção de troca ou reparo dos produtos ou partes retornados, com frete pago pelo cliente, depois de constatado o defeito da peça.
- Se o cliente desejar não retornar o produto ou parte a Condutron e solicitar o serviço do representante (se houver) na sua localidade para fazer ajustes ou reparos, o custo deste serviço será pago pelo cliente ao representante.
- Esta garantia não cobre danos causados por acidentes, mau uso, desgaste normal, descargas atmosféricas (raios), surtos (alterações) na rede de alimentação, inundações, catástrofes, ou utilizar seu equipamento para um outro propósito que não seja o de auxílio à locomoção.
- Se a falha ou defeito for causado por um mau uso ou desgaste natural, o cliente será cobrado pelas partes trocadas e mão de obra do serviço. A abertura de componentes selados viola a garantia.
- Os representantes não estão autorizados a dar garantia maior do que a do termo acima.

Controle Eletrônico: Não permita que alguém tente ajustar o controlador ou seus componentes. Isto violará a Garantia.

Conjunto de Tração Diferencial Motor e Freio: Este conjunto é montado com precisão e com lubrificação para muito tempo. Não permita que alguém tente ajustá-lo. Caso ele apresente algum ruído diferente, entre em contato com o Serviço Autorizado ou com a Condutron.

CONDUTRON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
R. João de Castilho 45 V. Clementino - São Paulo - SP CEP 04041-070
Tel:(011) 5574.0303 Tel-Fax:(011) 5575.9710
E-mail: vendas@condutrone.com.br
www.condutrone.com.br

